



Teste Rápido para Sífilis e HIV

Protocolo de Bancada



SD Bioline Syphilis 3.0

Amostra: Sangue Total

Quantidade: uma marca da pipeta capilar (20µL)

Tampão: 4 gotas

Tempo: 10 minutos

TR DPP Sífilis

Amostra: Sangue Total

Quantidade: uma alça coletora (10µL)

Tampão do paciente: 2 gotas no poço 1

Tempo: 5 minutos

Tampão de corrida: 4 gotas no poço 2

Tempo: 10 minutos

Bio Manguinhos HIV 1 e 2

Amostra: Sangue Total

Quantidade: uma alça (5µL)

Tampão: 3 gotas

Tempo: 10 minutos

Rapid Check HIV 1 & 2

Amostra: Sangue Total

Quantidade: 2 gotas (20µL)

Tampão: 1 gota

Tempo: 15 minutos



Teste Rápido para HIV e Hepatites

Protocolo de Bancada



Rapid Check HIV 1 & 2
Amostra: Sangue Total
Quantidade: 2 gotas (20 μ L)
Tampão: 1 gota
Tempo: 15 minutos

TR DPP HIV
Amostra: Sangue Total
Quantidade: uma alça coletora (10 μ L)
Tampão do paciente: 2 gotas no poço 1
Tempo: 5 minutos
Tampão de corrida: 4 gotas no poço 2
Tempo: 10 minutos

Teste rápido Bioeasy - VHC
Amostra: Sangue Total
Quantidade: uma marca da pipeta capilar (10 μ L)
Tampão: 4 gotas
Tempo: 15 minutos

Vikia HBsAg - VHB
Amostra: Sangue Total
Quantidade: 3 gotas (75 μ L)
Tampão: 1 gota
Tempo: 15 minutos